



IQ POWER Patch

-  LATEXFREI & VEGAN
-  EINFACHE ANWENDUNG
-  MIT 10%-IGER CBD-LÖSUNG*

(D)

GEBRAUCHS- INFORMATIONEN

IQ Power Patch ist ein leicht elastisches Patch in Gitterform auf Basis von Polyester in dessen Acrylatkleber eine 10%-ige CBD-Lösung integriert ist. Enthält kein THC und wirkt daher nicht berauschend. Im Vordergrund stehen die physikalischen bzw. mechanischen Eigenschaften des Patches.*

ANWENDUNGSGEBIETE

- Schmerz-, Trigger- und Akupunktur-Taping*

ANWENDUNGSHINWEISE

- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Empfohlen wird die Anlage durch geschulte Personen wie Arzt, Heilpraktiker oder Physiotherapeut.
- Vor dem Aufbringen der Gitterpflaster die Haut entfetten. Das Patch sollte 20-30 Minuten vor sportlicher Aktivität angelegt werden.
- Es kann gelegentlich zu Hautirritationen kommen. In diesem Fall umgehend das Patch entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe Patch nicht verwenden oder zunächst an einer kleinen Hautstelle testen!
- Nicht auf offene Wunden und Hautverletzungen kleben! Bei Hautreaktionen wie Juckreiz oder Rötungen das Patch sofort entfernen!
- Schwangere dürfen das Patch nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt anlegen!
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

ANWENDUNGSDAUER

Das Patch hält bis zu 6 Tagen auf der Haut.

INHALTSSTOFFE

80% Polyester, 15% Polyurethan, 5% Acrylat
Klebmasse aus Acrylatkleber enthält 10%ige, CBD-Lösung (ohne THC).

* Wirkungen sind wissenschaftlich nicht bewiesen

TECHNISCHE DATEN

IQ Power Patch Professional Pack

- 18 Patches small (2,1cm x 2,7cm), beige
- 18 Patches medium (2,8cm x 3,6cm), beige

Verordnung (EU) 2017/745

Schwerwiegende Reaktionen oder Vorfälle bitte an folgende Adressen melden: Aktimed GmbH: <https://aktimed-tape.de> und der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes.



ÜBERSICHT ÜBER MÖGLICHE AKUPUNKTUR UND TRIGGERPUNKTE



 Aktimed GmbH, Theaterstr. 18,
69117 Heidelberg, Germany

 WellNetIQ GmbH
ABC-Straße 10
20354 Hamburg, Germany

